

Кресло-коляска для инвалидов Armed **FS212BCEG** соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение ФСЗ №2010/07912 действительно с 26.11.2010 г. Срок действия: не ограничен.

**Изготовитель: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, Ltd,**  
**«Фошан Донгфанг Медикал Эквипмент Мануфактори», (Лтд), Китай,**  
**5 Xingfu RD, Zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City,**  
**China**

**Дистрибьютор: ТМ «Армед»**  
Тел. в г. Москве: (495) 989-12-88  
Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02  
Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33

Гарантийный срок на кресло-коляску для инвалидов Armed **FS212BCEG** –12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции.

На быстроизнашивающиеся части (шины, камеры, обивка) гарантия не предоставляется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

**Телефоны сервисных центров:**

**г. Москва: (495) 989-12-89**

**г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02**

**г. Екатеринбург: (343) 368-11-22**

**Сайт: [www.armed](http://www.armed)**

## **Кресло- коляска для инвалидов Armed**

### **Модель FS212BCEG**

#### **Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации**



**Кресло-коляска для инвалидов Armed FS212BCEG** предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной и полной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием.

Передвижение возможно только при наличии сопровождающего лица.

## Соблюдайте требования безопасности и технические характеристики.

При соблюдении целевого назначения, требований безопасности и технических характеристик при использовании кресла-коляски какой-либо риск отсутствует.

### 1. Показания

Постоянные или временные нарушения опорно-двигательного аппарата:

- паралич;
- ампутации органов;
- повреждения или деформация органов;
- повреждения суставов (не на обеих руках) или контрактуры;
- другие заболевания опорно-двигательного аппарата.

### 2. Противопоказания

Использование кресла-коляски Armed FS212BCEG противопоказано при:

- невозможности сохранять сидячее положение;
- тяжелых нарушениях вестибулярного аппарата;
- потеря функциональности органов на обеих руках;
- психических расстройств;
- ограниченной или недостаточной способности к ориентации;
- наркотическом или алкогольном воздействии.

**Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию и конструкцию кресла-коляски без предварительного уведомления.**

### 3. Требования безопасности

- Перед использованием необходимо проконтролировать надежность крепления всех деталей кресла-коляски;
- Имейте в виду, что при изменении положения центра тяжести за счет смещения тела или изменения нагрузки на инвалидную коляску повышается опасность опрокидывания;
- Для преодоления препятствий обязательно используйте выездные пандусы и платформы;
- При посадке и высадке с кресла-коляски для инвалидов FS212BCEG колеса необходимо поставить на тормоза;
- При посадке и высадке не наступайте на опоры для ног;
- При наклоне кресла-коляски на угол более 10° имеется опасность опрокидывания назад;
- При движении без торможения в направлении препятствия (ступенька, бордюр и т.п.) имеется опасность выпадения человека из коляски вперед;
- Запрещается эксплуатация изделия с неисправными тормозами;
- При движении по дорогам соблюдайте правила дорожного движения.

### 4. Эксплуатация

Торговая марка «АРМЕД» (495) 989-12-88, (812) 702-73-02, (343) 368-12-33 [www.armed.ru](http://www.armed.ru)

## Посадка и высадка пациента

### - Посадка и высадка спереди:

1. Поставить кресло на стояночный тормоз.
2. Сложить вверх опору для стоп.
3. При помощи сопровождающего лица переместить пациента.
4. Опустить опоры стоп и поставить на них ноги.
5. Пристегнуть ремень безопасности

### - Посадка и высадка с боковой стороны

1. Поставить кресло на стояночный тормоз.
2. Откинуть подлокотники.
3. Сложить опоры для стоп вверх.
4. При помощи сопровождающего лица переместить пациента.
5. Разместить подлокотники и подножки в исходное положение.
8. Пристегните ремень безопасности.

### Складывание и раскладывание:

Кресло-коляска для инвалидов Armed FS212BCEG складывается и раскладывается без инструмента.

Складывание (Рис.1) и раскладывание (Рис.2) кресла-коляски для инвалидов Armed FS212BCEG производится по вертикальной оси.

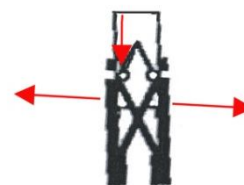


Рис.1

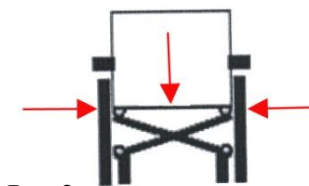


Рис.2

### 5. Описание

**Опоры для ног:** Съемные, регулируются по высоте.

**Подножки** - съемные, поворотные, подъемные оснащены мягкими опорами под голень.

### Тормоза:

Кресло-коляска для инвалидов Armed FS212BCEG снабжена слева и справа ручными тормозами. Нажав на рычаг, можно осуществлять торможение кресла-коляски до полного блокирования. Отщелкните вниз фиксаторы под рычагами ручного тормоза, что бы установить стояночный тормоз.

Стояночный тормоз нельзя использовать при движении, только для стоянки.

Торговая марка «АРМЕД» (495) 989-12-88, (812) 702-73-02, (343) 368-12-33 [www.armed.ru](http://www.armed.ru)

**Колеса:**

Задние колеса с пневматическими шинами. Передние колеса из вспененного пенополиуретана.

**Подлокотники:**

Подлокотники откидные.

**Рама:**

Металлические части изготовлены из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава.

**Сиденье и спинка:**

Выполнены из ткани с водоотталкивающей пропиткой. Спинка откидная, угол регулируется до 90°. Спинка оснащена мягким, съемным, регулируемым по высоте подголовником на липучке, съемными боковыми ограничителями.

Сиденье оснащено мягким, съемным абдуктором.

**6. Технические характеристики**

Длина в рабочем состоянии, мм	<b>1800</b>
Ширина в рабочем состоянии, мм	<b>650</b>
Ширина в сложенном состоянии, мм	<b>290</b>
Высота, мм	<b>1080</b>
Ширина сиденья, мм	<b>420</b>
Глубина сиденья, мм	<b>400</b>
Высота сиденья, мм	<b>500</b>
Вес нетто, кг	<b>20,2</b>
Грузоподъемность, кг	<b>100</b>
Диаметр задних колес, мм	<b>400</b>
Диаметр передних колес, мм	<b>150</b>

**7. Приведение в движение и торможение:**

Сопровождающее лицо может приводить кресло-коляску для инвалидов Armed **FS212BCEG** в движение и управлять ею с помощью предусмотренных для этого рукояток. Сопровождающее лицо должно быть физически и психически в состоянии тормозить кресло-коляску собственными силами. Для парковки используется стояночный тормоз.

Кресло-коляска для инвалидов Armed **FS212BCEG** не предусмотрена для самостоятельной езды.

**8. Транспортировка:**

- Кресло-коляска удобно складывается и занимает мало места.
- Нельзя использовать в качестве сиденья в автомобиле.

**9. Рекомендации по уходу:**

При эксплуатации кресло-коляска для инвалидов Armed **FS212BCEG** требует определенного технического ухода.

Обивку сиденья, спинки и подлокотники необходимо чистить теплой водой с применением мягких моющих средств.

Механизм складывания необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом.

Необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла-коляски имеет декоративно-защитное покрытие и поэтому требует к себе бережного отношения. Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами.

**6. Комплектация**

1. Кресло-коляска \_\_\_\_\_ 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации \_\_\_\_\_ 1 шт.
3. Насос \_\_\_\_\_ 1 шт.
4. Набор гаечных ключей для регулировки длины подножек и подтягивания крепежных элементов сиденья \_\_\_\_\_ 1 шт.