

## Сведения о сертификации

Средство реабилитации для инвалидов: ходунки «Armed» FS919L, соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение ФСЗ №2010/06754  
действительно от 28.04.2011 г. Срок действия: не ограничен.

**Изготовитель: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, Ltd,  
«Фошан Донгфэнг Медикал Эквипмент Мануфактори», (Лтд), Китай,  
5 Xingfu RD, Zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City,  
China**

**Дистрибьютор:** ТМ «Армед»  
Тел. в г. Москве: (495) 411-08-11  
Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02  
Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33

Гарантийный срок на средство реабилитации для инвалидов: ходунки «Armed» FS919L –12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции.

На быстроизнашивающиеся части гарантия не предоставляется.  
Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

### Телефоны сервисных центров:

г. Москва: (495) 411-08-11  
г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02  
г. Екатеринбург: (343) 357-33-61

Сайт: [www.armed.ru](http://www.armed.ru)



## Средство реабилитации инвалидов:

**ходунки «Armed» FS919L**



*Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации*

**Средство реабилитации для инвалидов: ходунки «Armed» FS919L** улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие и уменьшают нагрузку на нижние конечности.

По сравнению с тростью и костылями, ходунки обеспечивают наибольшую стабильность и устойчивость пациентов за счет более широкой базы для поддержки и опоры, улучшенной продольной и поперечной устойчивости.

Ходунки изготовлены из анодированных алюминиевых трубок, с лаковым защитным покрытием, имеют мягкие накладки на поручни. Ножки снабжены резиновыми наконечниками против скольжения. Высота ходунков регулируется надежным кнопочным фиксатором, через 2,5 см. Отверстия для регулировки высоты находятся в нижней части передних и задних ножек. Ходунки «Armed» FS919L универсальные, складные и очень удобные для хранения.

Конструкция ходунков предусматривает два положения: шагающее, не шагающее. Чтобы перевести ходунки в шагающее положение, необходимо снять пластиковые фиксаторы не шагающего положения и вставить их в отверстия для фиксации шагающего положения. Пациент при ходьбе, руками опираясь на поручни, поочередно переставляет одну боковую сторону, затем другую.

Складывание и раскладывание производится при помощи надежного фиксатора, который расположен на верхней трубке, соединяющей боковые рамы. Что бы сложить ходунки: нажмите на фиксатор и сдвиньте пластиковый замок, так чтобы фиксатор остался в нажатом положении, боковые рамы сложите внутрь.

При использовании ходунков следует помнить о том, что:

- для максимальной устойчивости ходунки нужно поднять и затем опустить на все четыре ножки;
- необходимо поддерживать правильную осанку и положение тела;
- не подходить слишком близко к передней перекладине, так как это может уменьшить опору и привести к падению назад.



#### Технические характеристики:

1. Облегченный корпус из алюминиевого сплава
2. Складные с одним замком
3. Универсальные (шагающие (передвижение «шагом» (поочередная перестановка левой и правой стороны))/не шагающие с функцией переключения.
4. Регулировка высоты через 2,5 см (8 уровней изменения высоты)
5. Максимальная нагрузка – до 110 кг
6. Глубина - 46 см
7. Ширина – 51 см
8. Высота – 78 - 96 см
9. Вес – 2,4 кг