


## Кровать функциональная механическая Armed RS105-B с принадлежностями

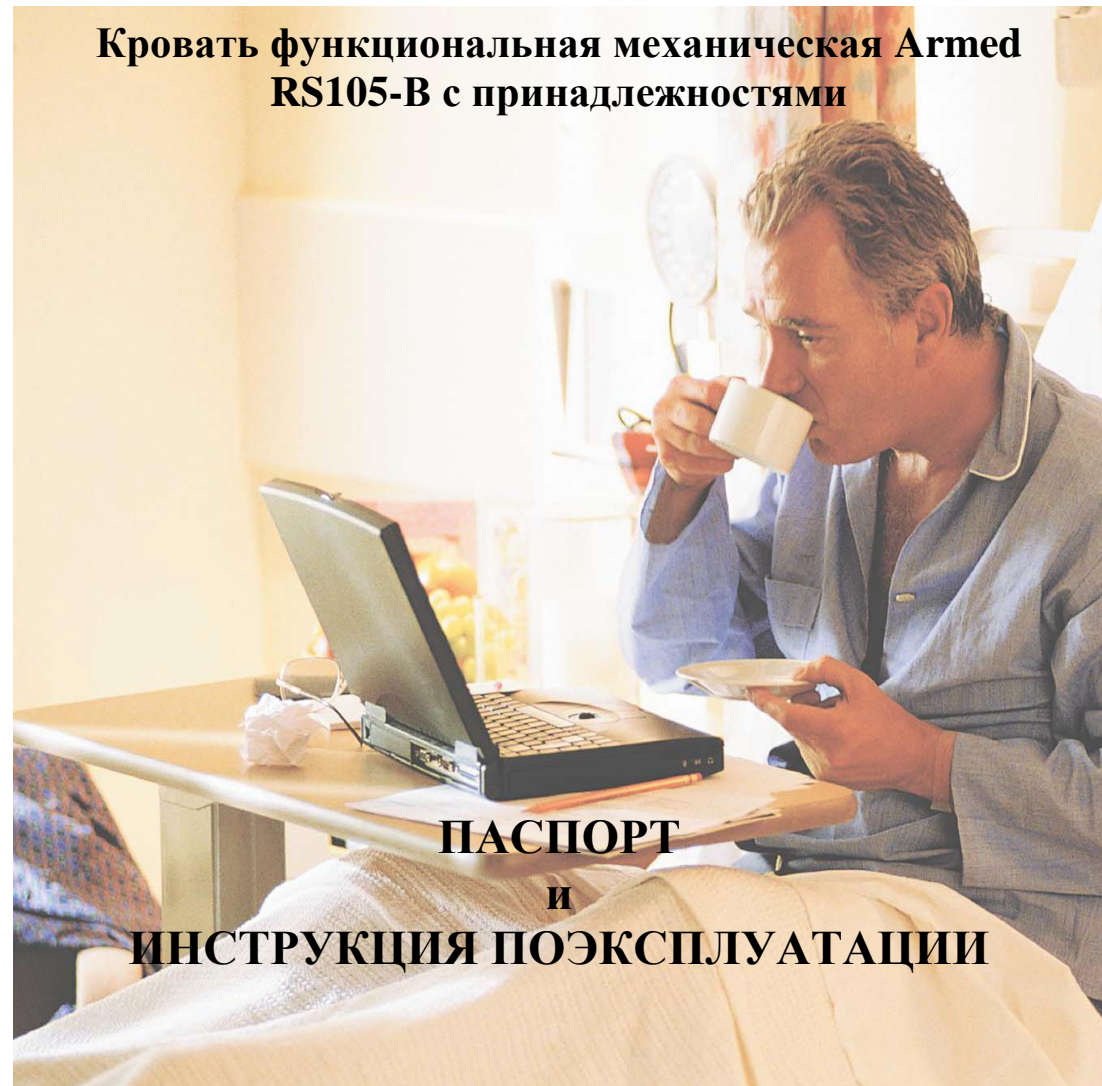

**ПАСПОРТ**

**И**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### 1. Описание

Кровать функциональная механическая Armed RS105-B с принадлежностями предназначена для использования как в лечебных учреждениях для ухода, диагностики и лечения пациентов под наблюдением врача, так и в домашних условиях для профилактики, лечения и восстановления больных.

- Данная кровать может быть использована в стационаре и в домашних условиях, для ухода за пациентом и служить для диагностики, лечения и наблюдения за ним.

- Безопасная рабочая нагрузка на кровать составляет 250 кг.

- Кровать пригодна для многократного применения. При повторном использовании кровати необходимо протереть или продезинфицировать, а также провести инспекцию ее состояния.

Кровать может быть использована только в соответствии с данным Руководством. Любое другое использование рассматривается как несоответствующее требованиям.

### 2. Основные технические характеристики

Габариты транспортной упаковки (Д x Ш x В, мм)	2120 x 990 x 360 (0, 75 м <sup>3</sup> )
Габариты (Д x Ш x В без ограждений, мм)	2050 x 930 x 500
Вес нетто/брутто (кг)	75/80
Площадь поверхности ложа (Д x Ш, мм)	1950 x 900
Высота ложа (мм)	500
Колеса (мм)	125
Предельный вес нагрузки (максимальная суммарная нагрузка, кг)	250
Максимальная грузоподъемность (кг)	200
Изменяемый диапазон углов наклона секций:	
спинной секции	0° - 80°
ножной секции	0° - 40°

### 3. Комплектация

#### Упаковка:

- 1) Рама с закрепленными на ней секциями и механизмами – 1 шт.
- 2) Ножные опоры с колесами – 2 шт.
- 4) Торцевые ограждения – 2 шт.
- 5) Боковые ограждения с рычагами для опускания – 2 шт.
- 6) Подставка для судна – 1 шт.
- 7) Устройство для подтягивания «Monkey Pole» – 1 шт.
- 8) Инфузионная стойка – 1 шт.
- 9) Крепеж (комплект) – 1 шт.
- 10) Паспорт (инструкция) – 1 шт.

### 4. Аксессуары (дополнительно)

Матрац с чехлом (Д x Ш x В, мм) 1950 x 900 x 70

Матрац изготовлен из полиуретана. Чехол съемный на «молниях» из ткани с водоотталкивающей пропиткой и воздухопроницаемыми клапанами.

При необходимости использования устройства для подтягивания «Monkey Pole», инфузионной стойки для вливаний и т. п., вставьте их в соответствующие отверстия в торцевом ограждении.



Рама и секции ложа изготовлены из стали и покрыты ударопрочной эпоксидной эмалью.

изголовье

4-хсекционное ложе

Боковые ограждения складные алюминиевые. Нажмите на красную клавишу и, удерживая её, опустите боковое ограждение.

Торцевые ограждения изготовлены из ABS-пластика с меламиновыми вставками «под дерево».

боковые ограждения

изножье

Ручки для регулировки наклона секций

подъем спинной секции

подъем ножной секции



Колеса

**Блокировка:**  
Нажать ногой педаль тормоза.

**Разблокировка:**  
Поднять вверх педаль тормоза.

Бамперы, расположены по углам кровати, защищают корпус от повреждений.



Ручки рычагов регулировки поверхности оборотно-складного типа. Рычаги регулировки оснащены механическим приводом с червячной передачей.



**Перед использованием кровати, обязательно прочтите Руководство по эксплуатации.**

## **5. Сборка и подготовка к эксплуатации**

Вскройте упаковку и проверьте комплектацию (см. п. 7)

При поставке с завода кровать разобрана на части для удобства доставки. Открывая упаковку изделия, нужно проверить целостность деталей и наличие документов. Сохраните документы для дальнейшего использования.

**Внимание!:** На заводе кровати упаковываются по 2 шт. в одну коробку.

### **Порядок сборки**

Основная конструкция кровати не требует сборки.

1) В ножные опоры, имеющие внутреннюю резьбу, вкрутите несущие части колес, так же имеющие резьбу. (Колеса у изголовья – без тормозов, в ножной части – с тормозами). Ножную опору зафиксируйте на раме при помощи винтов.

2) Прикрепите боковые ограждения болтами.

3) По углам кровати имеются по два опорных штыря с фиксатором. Подняв фиксаторы, установите головную и ножную торцевые ограждения. Опустив фиксаторы, ограждения блокируются.

4) Подставка для судна съемная и может быть установлена на продольной планке ножной опоры.

5) При необходимости использования устройства для подтягивания «Monkey Role», инфузионной стойки для вливаний и т. п., вставьте их в соответствующие отверстия в торцевом ограждении.

### **Примечание**

Кровать должна быть установлена на ровном полу без уклонов.

Выбор места для кровати должен исключать случайные удары и толчки.

Прочистить и продезинфицировать кровать перед первым и повторными использованиями.

## **6. Меры безопасности**

Перед использованием необходимо проверить прочность фиксации компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Ненадлежащее использование кровати может привести к ее повреждению и травмам пациента или персонала.

Примеры ненадлежащего использования:

• *использование для целей, не относящихся к нормальной функции больничной кровати, предназначенной для интенсивной или обычной*

Торговая марка «АРМЕД» (495) 411-08-11, (812) 702-73-02, (343) 368-12-33 [www.armed.ru](http://www.armed.ru)

*терапии,*

• *использование кровати в барокамере,*

• *использование кровати, функций, принадлежностей или перемещение кровати детьми или неуполномоченными лицами,*

• *размещение каких-либо предметов или оборудования на шасси или его использование в качестве опоры для человека,*

• *использование кровати с нагрузками, превышающими 250 кг (безопасная рабочая нагрузка),*

• *использование кровати с пациентами, вес которых превышает 200 кг,*

• *перемещение кровати, когда 2-а колеса заблокированы,*

• *использование на улице или транспортировка пациентов в автомобиле,*  
• *перемещение кровати по мягкому грунту или по несоответствующей поверхности,*

• *перемещение кровати по уклону, превышающему 10° (с пациентом или без пациента).*

## **7. Чистка, техническое обслуживание**

1) Не демонтировать «ручку тяги» и «шкив тяги» «регулирующий винт» и другие части механизма.

2) Следует избегать царапин или вмятин на поверхностях деталей, на которых гальваническим способом нанесен слой металла, или на компонентах, покрытых эпоксидной эмалью.

3) Чистите и смазывайте металлические части и ручной рычаг передачи каждый год для продления срока эксплуатации изделия.

Протирайте кровать тканью, слегка смоченной обычным дезинфицирующим составом. Не используйте слишком большое количество жидкости. Эта кровать обеспечивает легкость чистки и оптимальную гигиеничность.

Соблюдайте инструкции изготовителя дезинфицирующих средств.

Несоблюдение этого условия может привести к травме пациента или повреждению оборудования.

### **Рекомендуемый способ чистки и дезинфекции**

• Всегда протирайте сверху вниз, переходя от самого чистого к самому загрязненному месту.

• Не скребите поверхности.

• Протирайте влажным материалом (смачивайте столько раз, сколько необходимо, и не используйте большое количество воды).

• Для обеспечения максимальной эффективности дайте средству высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя дезинфицирующего средства.

• При необходимости ополосните: соблюдайте рекомендации поставщика дезинфицирующего вещества.

Торговая марка «АРМЕД» (495) 411-08-11, (812) 702-73-02, (343) 368-12-33 [www.armed.ru](http://www.armed.ru)

- Смените протирочный материал при переходе от менее загрязненных мест к более загрязненным местам.
- Смените протирочный материал при переходе к чистке другой кровати.
- После чистки кровати дайте ей хорошо просохнуть.

#### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

*Не используйте грубые чистящие или моющие средства, такие как металлические губки и сильнодействующие очистители или растворители, такие как толуол, ксилол или ацетон. Это может привести к повреждению оборудования и негативному воздействию на безопасность пациента.*

#### **8. Техническое обслуживание**

Необходимо производить минимальную визуальную проверку состояния и работоспособности кровати через частые регулярные промежутки времени и каждый раз перед повторным применением кровати.

В случае подозрения на наличие повреждения или неисправности, кровать должна быть немедленно выведена из эксплуатации до ремонта или замены неисправных частей.

#### **9. Устранение неисправностей**

В случае обнаружения неисправностей следует обратиться в авторизованный сервисный центр.

Пользователь ни в коем случае не должен пытаться устранить неисправность электрической системы самостоятельно.

#### **10. Окружающие условия**

Максимальный уровень шума при регулировке: менее 50 дБ

Нижеприведенные условия должны быть соблюдены:

- Температура хранения + 5° С + 50° С
- Относительная влажность 50% 70%
- Температура хранения при эксплуатации + 10° С + 40° С
- Относительная влажность 20% 90% (не рассматривается)
- Атмосферное давление 700 гПа 1060 гПа

#### **Сведения о сертификации**

Кровать функциональная механическая Armed RS105-B с принадлежностями соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение ФСЗ №2010/08021 действительно с 14.10.2010г. Срок действия: не ограничен.

**Изготовитель: «Shanghai Rongshun Hardware and Plastic Co., Ltd»,**

**“Шанхай Рогшан Хардвее энд Пластик Ко., Лтд”, Китай,**

**18 Miaopu road, Luodian town, Baoshan Dist. Shanghai**

**Дистрибьютор: ТМ «Армед»**

Тел. в г. Москве: (495) 411-08-11

Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02

Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33

Гарантийный срок на кровать функциональную механическую Armed RS105-B с принадлежностями–12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

#### **Телефоны сервисных центров:**

**г. Москва: (495) 411-08-11**

**г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02**

**г. Екатеринбург: (343) 357-33-61**

**Сайт: [www.armed.ru](http://www.armed.ru)**